



Orthesen en voetprothesen

*Orthesen en voetprothesen
geven aanvulling naar behoefte*

*Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd
voor te schrijven:*

Eerste verstrekking:

- Revalidatieartsen
- Orthopedische chirurgen
- AWBZ Verpleeghuisartsen*

Herhalingsverstrekking:

- Huisartsen

* Vergoeding alleen bij verblijf in verpleeghuis

Orthesen en voetprothesen geven aanvulling naar behoefte

De orthopedische schoentechniek houdt zich niet alleen bezig met schoenen, maar ook met het vervaardigen van orthopedische voorzieningen voor de voet of het onderbeen. Dergelijke voorzieningen, samen te vatten onder de benamingen orthesen en prothesen, worden toegepast bij ernstige voetproblematiek. Bij orthesen gaat het om voorzieningen die vooral ondersteunen of fixeren, voetprothesen vormen een aanvulling van ontbrekende lichaamsdelen.

Rameau levert orthesen zoals arthrodesekokers, nacht-spalken en binnenschoenen, en diverse voetprothesen. Deze orthopedische voorzieningen worden gemaakt ter ondersteuning, correctie of bescherming van voet of onderbeen. De voetprothese dient om het lopen na een amputatie te bevorderen.

Alle orthopedische voorzieningen worden geheel individueel gemaakt.

Arthrodesekoker

Een arthrodesekoker of –spalk wordt toegepast bij sterk verminderde werking van de spieren in de voet of het onderbeen. De stevigheid van de koker of spalk vervangt dan de geringere spierfunctie en ondersteunt of fixeert zo nodig het enkelgewricht. De arthrodesekoker wordt onder andere toegepast bij de behandeling van post-traumatische aandoeningen, reuma, spieraandoeningen en CVA.

Nachtspalken

Nachtspalken zorgen ervoor, dat de onderste ledematen in een bepaalde stand blijven als iemand in bed ligt. Zo wordt de stand van onderbeen of voet gecorrigeerd. Als er al een verandering is opgetreden kan worden voorkomen, dat de voet nog verder van stand verandert. Nachtspalken worden toegepast tijdens het rusten overdag of het slapen 's nachts.

Bedverbandschoen

Een bedverbandschoen is een bijzondere vorm van de voorlopige orthopedische schoen (VLOS) Deze wordt in bed gedragen om een wondgebied aan de voet of het been, bijvoorbeeld een decubituswond aan de hiel, te ontzien en te beschermen. Om een optimale drukverdeling te bereiken wordt deze voorziening individueel aangemeten.

De bedverbandschoen zorgt ervoor, dat er bij het liggen in bed geen druk meer op de wond wordt uitgeoefend. Daardoor is het wondgebied minder pijnlijk en genezen de wonden beter. Bij langdurige bedlegerigheid kan de bedverbandschoen tevens worden gebruikt om vervorming van de voet te voorkomen.

Binnenschoen

De binnenschoen is een orthopedische voorziening, die wordt gedragen in een confectieschoen, een semi-orthopedische schoen of een maatschoen. De binnenschoen zorgt voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij vervorming van de voet, compenseert een verschil in been- of voetlengte of geeft aanvulling in geval van amputatie.

Prothese

Een prothese vervangt een geheel of gedeeltelijk ontbrekend lichaamsdeel. De orthopedische schoentechniek maakt voornamelijk prothesen voor delen van de voet, die zijn geamputeerd.

Medische indicatie

Orthopedische voorzieningen worden de eerste keer altijd voorgeschreven door een revalidatiearts of een orthopedisch chirurg. Het orthopedisch schoentechnisch bedrijf Rameau maakt de voorzieningen op grond van de medische indicatie, waarin wordt vermeld wat het probleem precies is, en waar de voorziening aan moet voldoen.

De medische indicatie is ook van belang om de kosten van de orthopedische voorzieningen vergoed te krijgen van de zorgverzekering. Rameau heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de levering van orthopedische schoenvoorzieningen. De volledige aanvraag wordt door Rameau verzorgd, mits het juiste aanvraagformulier van de specialist aanwezig is. De betrokken specialist schrijft een aanvraagformulier uit. Dit formulier heeft Rameau nodig voor het maken van een prijsopgave en het aanvragen van een machtiging. Als de zorgverzekeraar de aanvraag accepteert, ontvangt Rameau een machtiging.

Vervolgaanvragen

De orthopedische voorzieningen die in deze folder genoemd zijn worden over het algemeen eenmaal per twee jaar verstrekt.

Een vervolgaanvraag voor een herhaling kan ofwel door de specialist tijdens een controleafspraak worden uitgeschreven, ofwel door de huisarts.

Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Als er een nieuwe voorziening nodig is omdat de medische indicatie is veranderd of in verband met groei, is tussentijdse vergoeding ook mogelijk. Hiervoor is echter altijd een aanvraag van de specialist nodig.

Specialistisch maatwerk

Aanmeten

Een orthopedische voorziening is volledig individueel aangemeten. Tijdens het aanmeten wordt het voorschrift van een verwijzend arts in een passende voorziening vertaald. De specialisten van Rameau beginnen met een onderzoek van onderbeen en/of voet en analyse van het looppatroon, voordat zij een orthopedische orthese, binnenschoen of prothese aanmeten. Het aanmeten gebeurt bij voorkeur op afspraak en duurt tussen een half uur en een uur. Rekening houdend met het voorschrift van de arts kunnen diverse details worden besproken, zoals de toe te passen voorzieningen en eventueel het bijbehorende type schoen, kleur en model.

Passen

Bij het aanmeten wordt zo mogelijk meteen een afspraak gemaakt voor het passen. Eventuele correcties kunnen dan nog aangebracht worden. Bij het passen worden de pasvorm en het effect van de voorziening bekeken. In sommige gevallen kan de orthese of prothese een bepaalde periode thuis worden uitgeprobeerd, eventueel samen met de fysiotherapeut. De effectiviteit kan in die periode eventueel ook door de voorschrijvende arts worden beoordeeld. Het duurt dan natuurlijk wel langer, tot de voorziening helemaal klaar is.

Als de toepassing van een bepaalde orthopedische voorziening ook het dragen van (semi) orthopedische schoenen met zich meebrengt, worden tijdens het passen ook de kleur en het model van de schoen samen met de klant definitief bepaald. De klant heeft hierin veel keuze uit actuele schoenmodellen en kleuren.

Afleveren

Na het passen wordt een afleverafspraak gemaakt. Op dat moment vindt de laatste controle plaats voordat de orthese, binnenschoen of prothese wordt afgeleverd.

Het maken van maatwerk-voorzieningen neemt nogal wat tijd in beslag: aanmeten, passen, eventueel nog een correctie aanbrengen en afwerken. De levertijd van de verschillende orthopedische voorzieningen loopt uiteen, omdat het om strikt individuele voorzieningen gaat. Het streven is echter om de voorziening binnen zes tot acht weken af te leveren.

Als de orthese of prothese kan worden gecombineerd met een confectieschoen, kunt u desgewenst advies krijgen over de te dragen schoenen. Voor het aanschaffen van geschikte confectieschoenen kunt u eveneens terecht; Rameau beschikt over een uitgebreide collectie modieuze dames- en herenschoenen. Deze schoenen zijn allemaal voorzien van een uitneembaar voetbed en daardoor zeer geschikt voor het dragen van een orthese of prothese.

Gewenning

Tijdens het adviseren, aanmeten, passen en afleveren van orthopedische hulpmiddelen is veel aandacht besteed aan de juiste pasvorm. Toch zal de voet en eventueel het onderbeen moeten wennen aan een nieuwe stand of ondersteuning. Als er bij de orthopedische voorzieningen ook nieuwe schoenen horen, moet het leer daarvan zich bovendien aan de voet aanpassen.

Houdt u rekening met een zekere gewenningsperiode.

Het is verstandig om, indien mogelijk, de nieuwe orthese of prothese en eventueel bijbehorende schoenen de eerste dagen na de aflevering even af te wisselen.

Controle

Als u na twee weken niet kunt wennen aan de nieuwe voorzieningen en eventueel schoenen is het verstandig terug te komen voor extra controle. Zodra er drukplekjes ontstaan waarbij de huid dreigt te beschadigen moet u altijd zo spoedig mogelijk terugkomen. Met name voor diabetici is in dat geval extra controle van zeer groot belang.

Deze controle en eventuele wijzigingen aan de voorzieningen en schoenen behoren tot de normale aflevercondities en zijn gratis.

Als alles naar wens verloopt adviseren wij om orthopedische voorzieningen jaarlijks kosteloos te laten controleren op pasvorm, functionaliteit en draagcomfort. Als uit deze controle reparaties voortkomen, worden deze in rekening gebracht.

Reparatie

Regelmatig onderhoud en tijdige reparatie verhogen het comfort van uw orthopedische voorzieningen en schoenen en verlengen de levensduur. Tijdens alle spreekuren en tijdens openingsuren in de vestiging Sneek is het mogelijk om orthopedische voorzieningen en schoenen voor reparatie aan te bieden. Na telefonisch overleg kan in het bedrijf te Sneek de reparatie soms worden uitgevoerd terwijl u wacht.

Keurmerk, service en garantie

C.J. Rameau Orthopedische Schoentechniek b.v. heeft het branchekeurmerk SEMH-erkend

Bedrijf. De SEMH, een onafhankelijke stichting, stelt kwaliteitseisen vast in overleg met

patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners. Jaarlijks worden de

erkende bedrijven op deze eisen getoetst door de SEMH.

Service en garantie staan bij Rameau hoog in het vaandel.

Door de branche-organisatie NVOS zijn met de zorgverzekeraars verregaande afspraken gemaakt over pasvorm- en materiaalgaranties. Op nieuwe orthopedische voorzieningen geldt een garantie van drie maanden op de pasvorm, behalve als de vorm van de voet zelf verandert binnen die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden.

Rameau maakt alle arthrodesezoekers, nachtspalen, binnenschoenen, prothesen en (semi)-orthopedische schoenen met de grootst mogelijke zorg. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het bedrijf. Rameau beschikt als SEMH-erkend Bedrijf over een klachtenprotocol. Als een klacht niet in overleg wordt opgelost, kan de klachtencommissie van de branche-organisatie NVOS worden ingeschakeld. Indien u met de uitspraak van deze klachtencommissie niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillencommissie van de SEMH.

Voor de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid beschikt Rameau over een aansprakelijkheidsverzekering.

Openingstijden:


maandag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
dinsdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
woensdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
donderdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
vrijdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 16.30 uur

Voor informatie en afspraken:

tel. 0515 - 42 11 11.

Wij staan u graag te woord, persoonlijk of telefonisch. Voor extra informatie kunt u ook terecht op de website:

www.rameau.nl

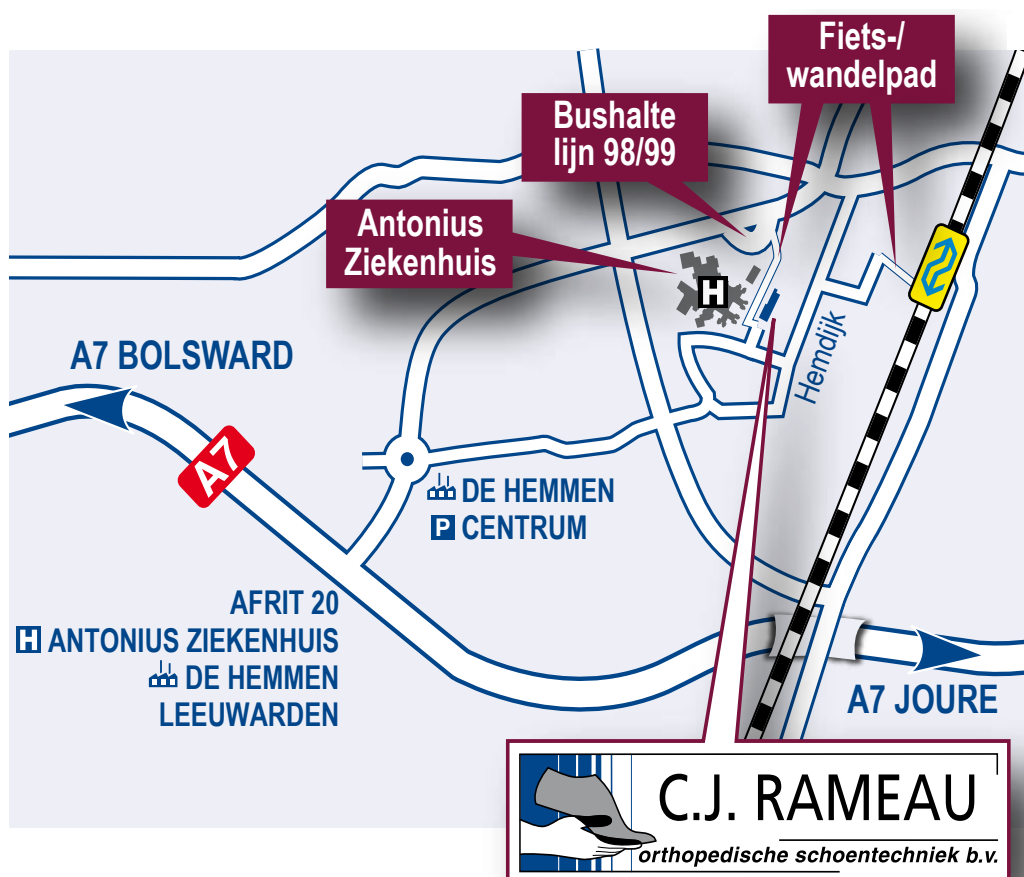

Simmerdyk 12
8601 ZP Sneek
T 0515 - 421111
E info@rameau.nl
I www.rameau.nl